



Informácia o použití, čítajte pozorne!

BABY prúžok Tehotenský test

Charakteristika

BABY test je jednoduchý, rýchly a spoľahlivý test na kvalitatívne stanovenie ľudského choriogonadotropínu hCG v moči 25mIU/ml a v sére 10 mIU/ml.

Je založený na princípe imunochromatografickej analýzy. Umožňuje špecifické stanovenie hCG v prítomnosti iných hormónov s podobnou štruktúrou.

Tento hormón začínajú produkovať bunky placenty po oplodnení cca 7. - 10. deň. Jeho koncentrácia sa prudko zvyšuje v prvých troch mesiacoch tehotenstva, aj mimomaterničkového. V 10.-12. týždni dosahuje maximum, neskôr klesá, až sa ustáli na konštantnej hladine až do skončenia šestonedelia (po pôrode, resp. po prerušení gravidity).

Vďaka vysokej citlivosti (99%) BABY test zachytí hormón hCG vo vzorke **moču kedykoľvek počas dňa** už 7. až 10. deň po počatí (nemusí teda byť použitý iba ranný moč).

Upozornenie

- ☞ Diagnostický prostriedok in vitro určený na samotestovanie CE 0197
- ☞ Testovací prúžok je len na jedno použitie.
- ☞ Pri nadmernej konzumácii tekutín môže byť vzorka moču príliš zriedená a nemusí obsahovať stanoviteľnú hladinu hCG. Konzumácia alkoholu výsledok testu neovplyvní.
- ☞ Ak si nie ste úplne istá výsledkom, je potrebné test zopakovať s novým prúžkom po 24 hodinách.
- ☞ Výsledok testu je potrebné porovnať s ostatnými klinickými príznakmi, preto odporúčame návštevu ženského lekára. Zvýšené koncentrácie hCG pretrvávajú do skončenia šestonedelia (po pôrode, resp. po prerušení gravidity). Môžu byť tiež spôsobené hormonálnymi liekmi alebo niektorými ochoreniami.

Postup

1. Na odber moču použite čistú a suchú nádobku (nie je súčasťou testu).
2. Vybaľte testovací prúžok z ochranného obalu. (Priložené vysúšadlo nepoužívať.)
3. Držte ho za modrú úchytnú plochu.
4. Na 6 sekúnd ho ponorte do vzorky moču - maximálne po úroveň značky. Potom prúžok vyberte a podržte v zvislej polohe.
5. Výsledok sa objaví v priebehu 3 minút.

Vyhodnotenie:

1. Tehotenstvo = pozitívny výsledok:



Na testovacej (strednej) časti prúžku sa objavia dve ružové čiarky, čo znamená, že v moči je prítomný hormón hCG. Farebné čiarky sa **môžu lišiť intenzitou sfarbenia**, čo ale nemá vplyv na interpretáciu výsledku. Je možné, že hladina hormónu hCG je ešte nízka. Na potvrdenie tehotenstva si môžete test zopakovať s novým prúžkom po 24 hodinách.

3. Ak sa na prúžku neobjaví ani jedna čiarka, skontrolujte, či bol prúžok dostatočne ponorený v moči. Ak sa ani v tomto prípade neobjaví žiadna čiarka, test opakujte s novým prúžkom.

2. Negatívny výsledok:



Na prúžku sa objaví jedna kontrolná ružová čiarka, ktorá potvrdzuje negatívny výsledok, ako aj to, že test je urobený správne. Ak sa však menštrúácia v stanovenom termíne nedostavila, zopakujte test s novým prúžkom.

Skladovanie

Test skladujte v neporušenom obale pri izbovej teplote mimo dosahu detí.

Nepoužívajte ho po uplynutí doby použiteľnosti, ktorá je vyznačená na obale.

Ak máte akokoľvek otázky ohľadne BABY mono / duo tehotenského testu, radi Vám ich zodpoviem.

Výhradný dovozca firmy W.H.P.M. Inc., USA pre SR a ČR:

BIOGEMA, Garbiarska 2, 04001 Košice, SR

tel.: 055 / 622 57 19, 633 67 53

e-mail: biogema1@stonline.sk

www.biogema.sk

Certifikovaný systém manažérstva kvality EN ISO 9001:2000 a 13485:2003

kód ŠUKL: P 72454

Revízia 4/2008